

Esteem⁺ viendaļīgs savācējmaisīņš



Ja āda ir sakairināta, pirms **Esteem⁺** (vai cita) savācējmaisīņa pielīmēšanas, variet apsmidzināt ādu ar izsmidzināmu aizsardzības līdzekli *Sil/esse*, kas veido silikona aizsargslāni. Tas aizsargā ādu un uzlabo savācējmaisīņa pielipšanu.



Sagatavojiet savācējmaisīņa atvērumsu pielīmēšanai. **Esteem⁺** viendaļīgais savācējmaisīņš ir universāla lieluma un piemērots stomām, kuru diametrs ir 20–70 mm. Izgrieziet stomas kontūru hidrocoloīda daļā, kas līp.



Līmējiet **Esteem⁺** savācējmaisīņu ap stomu. Līmēšanu uzsāciet no apakšējās daļas, izgrieztu atvērumsu cieši pielīmējot ap stomu. Paturiet pielīmēto maisīņu apmēram 30 sek., kamēr savācējmaisīņš labi pielīps ādai.



Lai savācējmaisīņš būtu vēl mazāk pamanāms zem apģērba, variet izmantot savācējmaisīņa *Stomasafe Plus* aizsargatbalsta jostu.

Esteem⁺ viendaļīgs savācējmaisīņš

Esteem⁺ ir ērtāki, drošāki un vēl labāk aizsargā pret nepatīkamu smaku.

+ Jauns filtrs ērtākā vietā

+ Jauna apaļveida savācējmaisīņa forma

+ Jauns kvalitatīvs savācējmaisīņa materiāls, kas neizplata skaņas

+ Speciāla kabata stiprinājuma paslēpšanai

CONVATEC
REF. 416719



Jaunie **Esteem⁺**

Bezmaksas informatīvais tālrunis 8 000 53 33.


No pirmdienas līdz piektdienai plkst. 8.30-17.00.

Kā lietot

Esteem⁺ viendaļīgos savācējmaisiņus

1: Ādas sagatavošana

Nomazgājiet ādu ap stomu ar maigām ziepēm, ūdeni un labi noslaukiet.

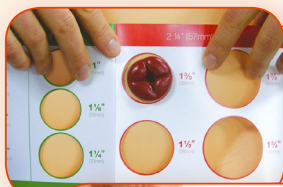

2: Savācējmaisiņa lieluma izvēlēšanās

Izmēriet stoma diametru un izvēlieties atbilstoša lieluma savācējmaisiņu.

■ Esteem⁺ savācējmaisiņš ar griezamu atvērumu

Šis savācējmaisiņš ir piemērots visiem, kuru stomas diametrs ir no 20 mm līdz 70 mm;

Uzzīmējiet savas stomas kontūru savācējmaisiņa hidrocoloīda vidus daļā un izgrieziet atbilstoša lieluma caurumu.



3: Pauspapīra noņemšana

Noņemiet pauspapīru no līmējamās hidrocoloīda savācējmaisiņa daļas.



4: Maisiņa uzlikšana

Uzlietējiet **Esteem⁺** savācējmaisiņu ap stomu. Līmēšanu sāciet no apakšējās daļas, izgriezto caurumu cieši pielīmējot ap stomu. Paturiet pielīmēto savācējmaisiņu 30 sek., kamēr savācējmaisiņš labi pielīp ādai. Rekomendējams izmantot arī papildus līdzekļus, kas uzlabo stiprinājumu – šķidrumu *Sillesse*, pastu *Stomahesive* (60g) vai aizsargsalvetes *ConvaCare*.



5: Maisiņa noņemšana

Uzmanīgi atceliet maisiņa malas no ādas, pieturot ādu ar otru roku. Ja āda ap stomu ir maitaina un ļoti jutīga, savācējmaisiņa noņemšanu atvieglojiet ar šķidrumu *Niltac*. Uzpūšat *Niltac* uz savācējmaisiņa malām un pagaidiet, kamēr hidrocoloīda daļas atlīmēsies pašas.




Maisiņš

Atvērumi savācējmaisiņiem ir ar pilnveidotu divkāršu InvisiClose[®] stiprinājumu.

■ InvisiClose[®] stiprinājums:

Trīskārtīgi salokiet savācējmaisiņa galu un visā garumā labi piespiediet, lai pielocītā daļa labi pielīptu. Tagad variet aizvērt savācējmaisiņa galu un ievilkāt speciālā savācējmaisiņa kabatā, lai savienojums nekairinātu ādu un nebūtu pamanāms zem apģērba.

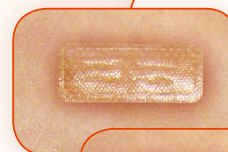

Filtrs

■ Aktivētās ogles filtrs ir augšējā maisiņa daļā, kas efektīvi novērš uzkrātās gāzes un nepiesārņo stomu saturu. Filtrs neitralizē smakas un novērš gāzes, tādēļ maisiņš nebūs uzpūties.

■ **Svarīgi:** uzlieciet filtru uz atvēruma, ja ar savācējmaisiņu vēlaties mazgāties (dušā), peldēties (ezerā, baseinā). Nomazgājoties un izžāvējot savācējmaisiņu filtra stiprinājumu variet noņemt.

Bezmaksas informatīvais tālrunis 8 000 53 33



www.stomas.lv