

Carefix™ StomaSafe Plus josta


**KOMPENSĒTS
100% APMĒRĀ**

Lietošanas instrukcija:

1. Uzvelciet *StomaSafe* jostu (pārliecinieties, ka uzraksts ir apakšmalā, jostas iekšpusē).
2. Izvelciet sotmas maisiņu caur iekšējo jostas atvērumu.
3. Novietojiet stomas maisiņu kabatā, kura atrodas jostas virsējā slānī, lai to nostiprinātu.
4. Nolociet pāri virsējo jostas slāni un *StomaSafe* ir savā vietā!

StomaSafe josta ir mazgājama. Pieejami trīs izmēri (mēra gurnos): **S/M** (85-110cm), **M/L** (105-125cm), **L/XL** (120-140cm).

✓ *Valsts kompensē 100% apmērā vienu **StomaSafe** elastīgo jostu gadā.*

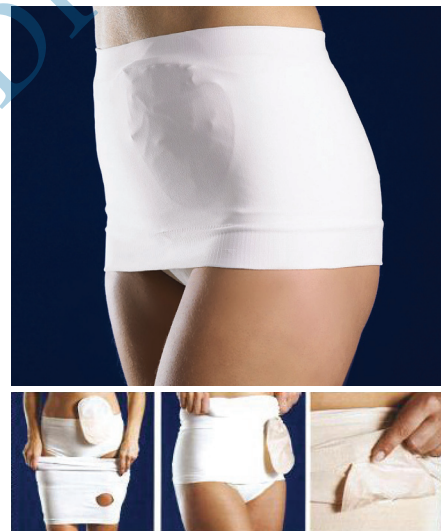

SIA Linus Medical bezmaksas informatīvais tālrunis **800 0 5333**.



®/™ Tytex Group preču zīme
© Copyright Linus Medical 2013

SIA Linus Medical,
K.Valdemāra iela 33A-3A,
Rīga, LV 1010

www.stomas.lv
www.linusmedical.com

ConvaTec Diamonds™



Ļoti absorbējošas, recējošas paciņas, kas ir rūpīgi izstrādātas, lai stomas maisa saturu pārvērstu gēlā.

Paredzēts lietošanai:

ConvaTec Diamonds ir rūpīgi izstrādāts, lai ileostoma maisu saturu pārvērstu gēlā. Ir pierādīts, ka *Active One* smaku kontroles sistēma samazina un bieži vien likvidē:

- nevēlamas smakas,
- "maisiņa piepūšanos" (gāzu izdalīšanos).

Iepakojumā 100 paciņas.

Lietošanas instrukcija

1. Ievietojiet vienu, pilnu paciņu savā maisiņā. Neveriet valā gēla paciņu.
2. Iztukšojiet vai arī atbrīvojieties/izmetiet maisa saturu kā parasti.

Papildus gēla paciņas var ievietot pēc maisa iztukšošanas, caur maisa atveri.

Aloe Vesta®



Labi putojošs tīrītājs ar sabalansētu pH līmeni, kas nav aerosola formā, un ir paredzēts lietošanai, lai atbrīvotos no fēču traipiem, kas radušies nesaturēšanas rezultātā. Bagātināts ar alveju un mīkstināšām vielām, lai nomierinātu un mitrinātu jutīgo ādu

Ādas attīrīšanai: Uzsmidziniet uz notraipītajām un/vai smakojošajām zonām. Viegli noslaukiet tās tīras. Atkārtojiet pēc nepieciešamības, līdz visi traipi ir pazuduši un āda kļūst tīra. Nožāvējiet. Nav nepieciešams noskalot.

Šampūns bez matu skalošanas: Iekļāviet putas mitros matos un iemasējiet tās. Ar mazgājamo lupatiņu viegli paberzējiet matus un galvas ādu, lai noņemtu netīrumus un taukus. Ja nepieciešams, atkārtojiet procesu. Ar dvieli izsusiniet matus sausus.

Sensi Care™



SENSI CARE mitrinošs ķermeņa krēms ādas aizsardzībai

Lietošanas instrukcija: Lietojiet tik bieži, cik tas ir nepieciešams.

Īslaicīgi aizsargā pret nelielām brūcēm, skrumbām un apdegumiem. Īslaicīgi aizsargā un

mitrina saspīlēto ādu un lūpas. Palīdz ārstēt un novērst izsitumus, kas radušies nēsājot autiņbikses. Aizsargā pret neliela ādas kairinājuma rašanos un novērš mitrumu.

Autiņbikses izsitumiem: Nomainiet slapjās autiņbikses, notīriet autiņbikses zonu un ļaujiet nožūt. Uzklāiet uz sausas ādas tik bieži, cik nepieciešams, it īpaši pirms gulētiešanas vai kad notiek ilgstoša ādas kairināšana slapjās autiņbiksītēs.

Bez smaržas.

SIA Linus Medical bezmaksas informatīvais tālrunis **800 0 5333.**



®/™ ConvaTec Inc preču zīme
© Copyright Linus Medical 2013

SIA Linus Medical,
K.Valdemāra iela 33A-3A,
Rīga, LV 1010

www.stomas.lv
www.linusmedical.com