



Mēs zinām visu par stomām

Būdam līderis stomas kopšanas līdzekļu jomā, ConvaTec visu savu enerģiju velta Jūsu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Jau vairāk kā 30 gadus ConvaTec rada stomas kopšanas līdzekļus, kas arvien paaugstina pacienta aprūpes standartus. Tie nav tikai mūsu produkti, tās ir arī mūsu zināšanas par stomas pacientu aprūpi, kurās gribam dalīties ar Jums.

LAT-04/17



	Linus Medical bezmaksas informatīvais tālrunis 8 000 53 33
	SIA Linus Medical, K.Valdemāra iela 33A-3A, Rīga, LV-1010
	www.convatec.com , www.linusmedical.com , www.stomas.lv

© un TM ir ConvaTec Inc. reģistrētas tirdzniecības markas. © 2017 Linus Medical.

Our world is what we make of it
(Mēs paši veidojam savu pasauli)



ConvaTec stomas nēsātāju aprūpe

Aksesuāri

Ādas kopšanai ikdienā. Dzīvei bez iekaisuma




Stomahesive® ādas kopšanas līdzekļi

Lai nodrošinātu stomas nēsātāja dzīvē ērtības un pašapziņas celšanos, ļoti būtiska ir pareiza stomas un ap to esošās ādas kopšana. ConvaTec ādas kopšanas līdzekļi paredzēti stomu aptverošās ādas aizsargāšanai no bojājumiem un kairinājuma. Šie ādas kopšanas līdzekļi ir veidoti no dabiskiem produktiem, izmantojot Stomahesive® tehnoloģijas. Stomahesive® ādas kopšanas līdzekļi radīti, lai palīdzētu uzturēt veselu ādu ap stomu un pagarinātu stomas kopšanas ierīču lietošanas laiku. Visi ādas kopšanas līdzekļi ir droši lietošanai ikdienā.

Peristomālās ādas sagatavošana pirms pamatnes uzlikšanas

Ādas kopšanas līdzekļi jālieto regulāri, lai izvairītos no peristomālās ādas iekaisuma. Veiciet visas darbības rūpīgi un nesteidzoties!

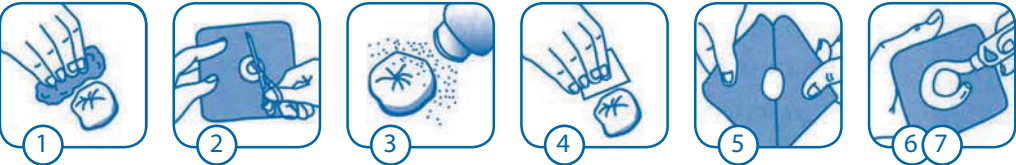

- Pēc vecās pamatnes noņemšanas mazgājiet peristomālo ādu ar ūdeni un ziepēm. Uz ādas palikušās līmvielas noņemiet ar ConvaCare® plāksnītēm adhezīva noņemšanai ① Tās ne tikai noņems adhezīva paliekas, bet arī mīkstinās ādu.
- Vēlreiz nomazgājiet ādu. Maigi nosusiniet un atstājiet, lai āda apžūst 2-3 minūtes.
- Kamēr āda apžūst, sagatavojiet pamatni. Ja darāt to pirmo reizi, tad mēriet stomu un izgatavojiet trafaretu, ko izmantot nākamajās reizēs (skatīt pamācību par trafareta izgatavošanu, kas pievienota somiņā). Izgrieziet pamatnē atvērumu, kas atbilst stomas izmēram ②
- Noņemiet no pamatnes pauspapīru ⑤, uzklājiet gar stomai izgrieztu atvērumu Stomahesive® ādu aizsargājošo pastu 60 g; 1 minūti ļaujiet izgarot spirtam, lai pasta nekostu ādā ⑥⑦
- Uz peristomālās ādas uzkaisiet Stomahesive® adhezīvo pūderi; dažas sekundes pagaidiet, lai pūderis „pieķeras” bojātajām ādas vietām ③
- Tad ar ConvaCare® plāksnītēm aizsargkārtas veidošanai, viegli pieskaroties, samitrina pūderi; ļauj nožūt 30 sekundes ④
- Uzlieciet pamatni uz stomas un maigi, bet gana stingri piespiediet un pieturiet, lai tā labi pieliptu.
- Ar mitru pirkstu vai mitru vates kociņu izlīdziniet virspusē izspiedušos pastu – pasta kā hermētiķis neļaus stomas saturam pakļūt zem pamatnes.

Aksesuāri

	Produkta nosaukums	Lietošana	Iepakojums	Noteiktie kompensācijas limiti
IKDIENAS LIETOŠANAI				
①	ConvaCare® plāksnīte adhezīva noņemšanai	Līmvielas noņemšanai (lietot gan stomas pamatņu/maisiņu, gan pārsēju atstātās līmvielas noņemšanai; ar citrusu smaržu)	100 gab.	Bez noteikta kompensācijas limita
④	ConvaCare® plāksnīte aizsargkārtas veidošanai	Veido uz ādas aizsargbarjeras slāni, saskaroties ar pamatnēm un hidrokoloidāliem pārsējiem	100 gab.	

	Produkta nosaukums	Lietošana	Iepakojums	Noteiktie kompensācijas limiti
IKDIENAS LIETOŠANAI				
⑥	 Stomahesive® ādu aizsargājoša pasta 60 g	Piepilda un aizsargā nelīdzenu peristomālo ādu. Palīdz novērst ādas kairinājumu; pagarina pamatnes lietošanas laiku	Tūbiņa 60 g	Bez noteikta kompensācijas limita
	 Combihesive®2S urīna nakts drenējamais maiss, 2 l	Ērtai urīna savākšanai ilgākā laika periodā. Pievieno urostomas maisiņam ar savienotājcaurulīti	Komplektā 5 maisiņi un viens statīvs	30 gab. gadā urostomas nēsātājiem
IEKAISUMA DZIEDĒŠANAI				
③	 Stomahesive® adhezīvais pūderis 25 g	Veido aizsargbarjeru uz kairinātas un iekaisušas ādas	25 g	Bez noteikta kompensācijas limita
	 Stomahesive® adhezīvā pasta, 30 g	Pasta, kas veidota uz eļļas bāzes, palīdz dziedēt iekaisušu ādu (pasta jāuzklāj un jāatstāj uz ādas apm. 30 min., tad jānomazgā ar ūdeni un ziepēm)	Tūbiņa ar aplikatoru 30 g	
DROŠĪBAS SAJŪTAI				
	 Josta lietošanai ar Combihesive® 2S stomu maisiņiem. Lietojama ar Natura™+ maisiņiem	Rada papildu drošību stomas nēsātājiem ar lieko svaru un tiem, kam nepieciešama papildu drošības sajūta	1	2 gab. gadā
	 Stomasafe josta	Piemērota visu veidu stomas nēsātājiem	1	1 gab. gadā
IKDIENAS UZLABOŠANAI				
	 ALP izsmidzināms smaku neitralizēšanas līdzeklis 200 ml	Efektīvi neitralizē un novērš nepatīkamas smakas telpā un uz apģērba	200 ml	VALSTS NEKOMPENSĒ
	 ALP pilieni smaku neitralizēšanai 30 ml	Sajaucoties ar visu veidu stomas maisiņu saturu, efektīvi neitralizē nepatīkamas smakas	30 ml	
	 SensiCare® mitrinošs ķermeņa krēms 85 g	Nomierina un aizsargā iekaisušu un sausu ādu	85 g	
	 ConvaTec Diamonds™	Ļoti absorbējošas, recējošas paciņas, kas ir rūpīgi izstrādātas, lai stomas maisa saturu pārvērstu gēlā	Iepakojumā 100 paciņas	
	 Aloe Vesta® daudzfunkcionālas atīrošās putas 236 ml	Labi putojošs tīrītājs ķermeņa un matu mazgāšanai	236 ml	