

Kā ātri un pareizi izrakstīt **UROSTOMAS** aprūpes produktus



Produkta nosaukums kompensējamo medicīnas ierīču sarakstā	Kompensācijas Id. Nr.	Iepakojums	Noteiktie kompensācijas limiti	
<b>Sion salvetes adhezīva noņemšanai</b>	<b>Jaunums!</b> Sekojiet informācijai KZS	100 gab.	<b>Bez noteikta kompensācijas limita</b>	
<b>Sion salvetes aizsargkārtas veidošanai</b>	<b>Jaunums!</b> Sekojiet informācijai KZS	100 gab.		
<b>Aerosols Esenta, aizsargkārtas veidošanai</b>	<b>Jaunums!</b> Sekojiet informācijai KZS	50 ml		
<b>Stomahesive ādu aizsargājoša pasta</b>	10/04-073/13-01	Tūbiņa 60 g		
<b>Stomahesive adhezīvais pūderis</b>	10/04-072/13-01	25 g		
<b>Stomahesive adhezīvā pasta</b>	10/04-071/13-01	Tūbiņa ar aplikatoru 30 g		
<b>Josta lietošanai ar Combihesive 2S stomu maisiņiem</b>	10/04-060/13-01	1		2 gab. gadā
Izrakstāma tikai divdaļīgajām sistēmām				
<b>Stomasafe josta</b> S/M (85-110 cm vēdera apkārtm.) 12/04-005/14-01 M/L (105-125 cm vēdera apkārtm.) 12/04-006/14-01 L/XL (120-140 cm vēdera apkārtm.) 12/04-007/14-01				1 gab. gadā

**UROSTOMAI – maisiņi jāmaina katru dienu**

- Noskaidrojiet **stomas tipu!**  
**Urostoma Z93.6**  
Cita kuņģa un zarnu trakta mākslīgā atvere Z93.4
- Stomas diametrs \_\_\_\_\_ mm**
- Tabulā, vadoties pēc stomas diametra un tās tipa, piemeklējiet **pareizo produkta veidu un izmēru**. Izrakstiet recepti! **#1.**  
Tā kā stomas diametrs pēcoperācijas laikā mainās, pirmajā vizītē izrakstiet griežamos maisiņus.  
**Pamatne un maisiņš ir viena vienība.**
- Izrakstiet **nakts maisus! #2.**
- Izrakstiet nepieciešamos **aksesuārus! #3.–10.**  
Viendaļīgās sistēmas lietotājiem nepieciešami visi kompensējami aksesuāri.

Sekoiet līdz limitiem!

Pacientam pēcoperācijas periodā ir iespēja saņemt valsts apmaksātu aprūpi mājās. Ģimenes ārsts izraksta nosūtījumu, atbilstoši MK noteikumu Nr. 265 pielikumam Nr. 94.

**Piemērs:**

Stomas tips: **urostoma**  
Stomas diametrs: **38 mm**

Viendaļīgā sistēma – kopā jāizraksta **10 receptes:**


**#1. Viendaļīgie maisiņi**  
Stomadress Plus viendaļīgi urostomas maisiņi 19-45 mm

Rp. **Stomadress Plus viendaļīgi urostomas maisiņi 19 mm**  
D.t.d. **Nr 90**  
DS. **Stomas kopšanai 3 mēnešiem**


**#2. Nakts maisi**  
Bicakcilar urīna drenējamie nakts maisi, tilpums 2 l

**#3.–10. Aksesuāri:**  
visi astoņi tabulā uzskaitītie aksesuāri no kompensējamo medicīnisko ierīču saraksta


Produkta nosaukums un apraksts	Stomas diametrs (mm)	Produkta izmērs un krāsas kods	Produkta nosaukums un Id. Nr. kompensējamo medicīnisko ierīču sarakstā	Limits vienam gadam	Recepte
<b>Stomadress® Plus viendaļīgs urostomas maisiņš</b>	19–45 mm (griežams)	19 mm	Stomadress Plus viendaļīgi urostomas maisiņi 19 mm	10/04-067/13-01	360 gab. 90 gab. 3 mēnešiem
	32 mm	32 mm	Stomadress Plus viendaļīgi urostomas maisiņi 32 mm	10/04-068/13-01	
	38 mm	38 mm	Stomadress Plus viendaļīgi urostomas maisiņi 38 mm	10/04-069/13-01	
<b>Bicakcilar urīna drenējamo maisi tilpums 2 l</b>			Bicakcilar urīna drenējamie nakts maisi, tilpums 2 l	22/04-003/14-01	30 gab. 5 gab. 2 mēnešiem

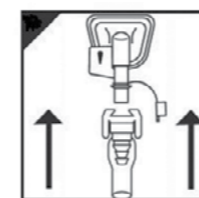

Natura+adapteris

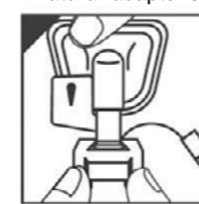

Stomadress+adapteris

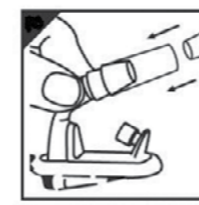

Stomadress+adapteris

Stomu maisi jāmaina katru dienu. Uz nakti jāpievieno urīna nakts maiss. Savienošanai izmantojiet adapteri, ko atradīsit urostomu maisu kastītē.

Pirmajā vizītē pie ģimenes ārsta, uzreiz pēc operācijas pacientam izrakstāmi **visi aksesuāri** un



**Stomas diametrs** mainās, sevišķi pēcoperācijas periodā.  
**Pirmajā produktu izrakstīšanas** reizē uzticieties tam, ko atzīmējusi slimnīcas māsiņa.  
**Atkārtoti izrakstot produktus**, jautājiet pacientam vai stomas diametrs ir mainījies un kāds tas ir.

Konsultācijas par stomas aprūpi, dzīvi ar stomu, produktu lietošanu: Linus Medical informatīvais tālrunis **80005333**  
Informatīvie materiāli un apraksti: **www.stomas.lv**

Visi izrakstāmo produktu daudzumi ir norādīti pamatojoties uz valsts noteiktajiem kompensācijas limitiem.