

Stomahesive® Seal

aizsarggredzeni



Darba sākšana – ādas novērtēšana

- Pārliecinieties, ka āda ir tīra un sausa.
- Sasildiet aizsarggredzenu rokās.
- Noņemiet aizsargplēvi no abām pusēm.



Pielāgojiet atbilstoši savām vajadzībām

- Veidojiet, rullējiet, izstiepiet vai saspiediet aizsarggredzenu, lai tas apņem stomu. Aizsarggredzenu var pārgriezt, likt vairākās kārtās vai atkal savienot, lai tas atbilstu stomas formai un ādas iedobumiem.
- Uzlieciet un izlīdziniet aizsarggredzenu stomas pamatnes virzienā. Nedaudz piespiežot, turiet to vietā apmēram 30 sekundes.



Stomas pamatnes uzlikšana

- Novietojiet stomas pamatni tieši uz aizsarggredzena un turiet to vietā 30 sekundes, viegli piespiežot, līdz tas ir nostiprināts.
- Lietojiet tik ilgi, kamēr tas šķiet ērti un droši, un nav radusies noplūde.



Noņemšana

- Noņemiet maisiņu vai pamatni no ķermeņa. Aizsarggredzena paliekas var noņemt no ādas tos rullējot un nolobot vai izmantojot ESENTA™ aerosolu adhezīva noņemšanai.

Piezīme: Nelietot, lai pārklātu bojātu ādu vai atvērtas brūces, vai ja Jums ir izveidojusies jutība vai alerģiska reakcija pret šo produktu.

Stomahesive® Seal

aizsarggredzeni

PADOMI UN IETEIKUMI

- ✓ Aizsarggredzens uzbriest. Saskaroties ar mitrumu, tas sažēlē, veidojot labāku blīvējumu un nodrošinot papildu ādas aizsardzību.
- ✓ Aizsarggredzens palīdz izlīdzināt ādas virsmu un iedobumus.
- ✓ Izmantojiet aizsarggredzenu zem Convex pamatnēm vai lietojiet to vairākās kārtās, lai aizpildītu nelīdzenumus zem viendaļīgajiem maisiņiem vai pamatnēm.
- ✓ Jūs varat pieskarties visām aizsarggredzena pusēm, to sarullēt, veidot, un tas nemazinās pielipšanas spēju.
- ✓ Jūs varat vienlaicīgi lietot Stomahesive® Seal aizsarggredzenu kopā ar Stomahesive® ādu aizsargājošo pastu pēc vajadzības.



PRODUKTA KODS	APRAKSTS	DAUDZUMS
413504	48 mm diametrs, 3 mm biezums	10
413503	48 mm diametrs, 4 mm biezums	10
413505	98 mm diametrs	10

	Bezmaksas informatīvais tālrunis 8000 53 33
	SIA "Linus Medical", K.Valdemāra iela 33A-14A, Rīga, LV-1010 PR. — CT. no 9:00 līdz 17:00, PK. no 9:00 līdz 16:00
	www.stomas.lv ; www.linusmedical.com ; www.bruces.lv ; www.wglikomets.lv

